

Carja cu sprijin pe antebraț Reglaj și utilizare



Carja simplă cu sprijin pe antebraț, confecționată din aluminiu. Suportul de sprijin al antebrațului, confecționat din propilena de înaltă densitate, are lungime fixă.

Reglajul în înălțime

Vezi figura de mai jos.

Se extrage piesa pentru reglarea înălțimii. Această piesă are un ax metalic care blochează cele două tronsoane ale carjei. Tronsonul inferior, cel cu amortizorul de cauciuc intră în interiorul tronsonului superior cel cu sprijinul pentru antebraț. În ambele tronsoane sunt practicate găuri de trecere prin care se introduce axul piesei de reglare în înălțime. Piesa de reglare extrasă, cele două tronsoane culisează unul față de celălalt astfel încât lungimea carjei crește sau scade. Când obțineți lungimea dorită introduceți axul piesei de reglare prin găurile de trecere blocând carja la lungimea aleasă.

Reglajul optim al înălțimii carjei: utilizatorul în poziție verticală cu mâna întinsă pe lângă corp. Carja în poziție verticală cu amortizorul de cauciuc pe podea. Manerul de sprijin al palmei trebuie să vină în dreptul încheieturii mâinii

